

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- ① 포장이 뜯겨져 있거나 손상되어 있는 경우 사용하지 않는다.

나. 사용방법

- ① 사용하고자 하는 뜯는 사용 중인 환자의 기관절개튜브의 플랜지 (연결 지지대) 끝 부분 연결구에 본 제품의 연결 고정 끈 (벨크로)를 넣는다.
- ② 연결 고정 끈 (벨크로)를 플랜지에 끼고 접어서 본체에 부착시킨다.
- ③ 본 제품의 짧은 쪽을 긴 쪽 본체 부분에 고정시킨다. 너무 팍 조이지 않게 주의하여 길이 조절을 한다.
- ④ 많이 남는 부분은 (긴 쪽 본체 부분) 가위로 잘라낸다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

본 제품은 일회용 의료기기이므로(Single-Patient Use) 재사용하지 않는다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 자격을 갖춘 의료인 또는 의료인 감독 하에 사용해야 한다.
- ② 본 제품은 단일환자용 (Single Patient Use)으로만 사용해야 한다.
- ③ 본 제품은 절대로 소독 또는 세척해서 재사용하면 안 된다. 임의적인 소독 및 세척 후 재사용은 감염 문제를 일으킬 수 있음에 주의한다.
- ④ 유효기간이 지나면 사용하지 않는다.
- ⑤ 보관 시 서늘하고 건조한 곳에 보관하며 자외선이 있거나 습기가 많거나 열이 있는 장소에는 보관하지 않는다.

※ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183